


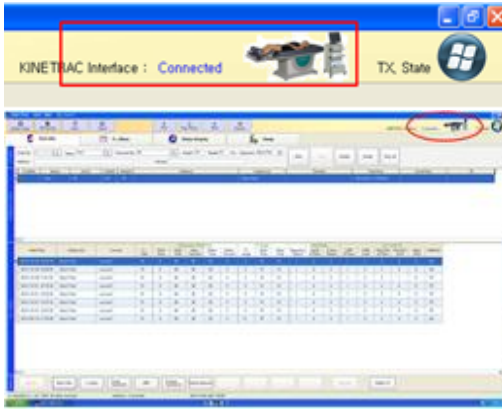


Вся продукция Южнокорейского завода Hanmed проходит проверки и тестирование на качество, однако если у Пользователя Kinetrac kpx-7000 возник сервисный случай рекомендуем прочитать этот раздел.

Перед тем как обратиться в сервис.

Ниже собраны возможные неисправности и способы их устранения.

<p>неисправность</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Программа не реагирует. - Основная часть программы не работает надлежащим образом - При неправильном соединении кабельных путей с оборудованием. На экране монитора увидите «Not connected». При нормальном подключении: «Connected». 	
<p>Действие</p>	<p>Проверьте соединение между портами на задней части компьютера (фотография отдела задней стороны компьютера) и PLC (программируемым логическим устройством управления). Необходимо проверить состояние кабельной установки.</p>	
<p>неисправность</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Прибор издает скрип. - Прибор шумит, при его использовании. 	
<p>Действие</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Осмотрите опоры каждого угла прибора. - Поверните вручную узел контроля подъема/опускания для выравнивания высоты опоры по отношению к полу. 	

<p>неисправность</p>	<p>- Фиксация голеностопного сустава снимается самопроизвольно.</p> <p>- В период использования ножного валика, возможно автоматическое поднятие валика от ладыжек. Поэтому, для устранения данной функции валика, необходимо заменить саму рукоятку.</p>	 <p>The top image shows a person's foot on a device with a red arrow pointing to a specific part. The bottom image shows the internal mechanism of the device, including a motor and a handle.</p>
<p>Действие</p>	<p>Замените приводное устройство. (Замена рукоятки (силового привода)).</p>	

<p>неисправность</p>	<p>- Прибор издает шум при наклоне во время работы двигателя.</p>	 <p>The top image shows a medical device with a blue cushioned seat and a control panel. The bottom image is a close-up of a handle mechanism, with a red circle highlighting a specific part and a red arrow pointing to it.</p>
<p>Действие</p>	<p>1. Осмотрите приводное устройство (Осмотр состояния приводного устройства) 2. Осмотрите состояние смазки приводного устройства и произведите его дозаправку (После осмотра дозаправка смазки приводного устройства) 3. Замените приводное устройство, если проблема остаётся после дозаправки консистентной смазкой. На рукоятку (или так называемый силовой привод) нанести смазочное вещество, в случае, повторного возникновения скрипа, необходима замена рукоятки.</p>	

<p>неисправность</p>	<p>- Масло подтекает под столом. - Стол шумит при передвижении нажимного валика.</p>	
<p>Действие</p>	<p>- Замените деселератор (замедлитель), если протекает масло. - Обратитесь в сервисный центр по замене деселератора - Впрыскивайте консистентную смазку в соединительную муфту между электродвигателем и деселератором, если деселератор работает без проблем.</p>	

Если Потребителю не удалось самостоятельно устранить неисправность, тогда необходимо:

Отправить заявку на электронную почту bogatove@bk.ru и указать:

- 1) Организацию конечного потребителя kinetrac knx-7000
- 2) Серийный номер kinetrac knx-7000
- 3) Контактное лицо конечного потребителя и контактный телефон для связи
- 4) Подробно описать характер неисправности и обстоятельства возникновения неисправности
- 5) Записать видеоролик с наглядным проявлением неисправности и переслать его вместе с сообщением

Организация, уполномоченная принимать претензии и производить сервисное обслуживание на территории РФ ООО «Комплексная гарантированная безопасность».